

# Willkommen bei NeuroNation MED!

Entdecken Sie Ihr wahres Potenzial und beginnen Sie mit Ihrem wissenschaftlichen Gehirntaining. Die NeuroNation MED-Anwendung wurde entwickelt, um Ihren Geist auf vielfältige und ansprechende Weise zu trainieren. Wir bieten eine Vielzahl spielerischer Übungen, die nicht nur effektiv sind, sondern auch Spaß machen! Mit unseren Übungen schulen Sie Ihr Gedächtnis und Ihre Aufmerksamkeit sowie die umfassende Verknüpfung verschiedener Sachverhalte.

NeuroNation MED führt eine Analyse Ihrer Stärken und Potenziale durch und erstellt einen persönlichen Trainingsplan für Sie. Hierbei handelt es sich um gezielte mentale Übungen, die durch wiederholte Ausführung einen oder mehrere kognitive Bereiche des Gehirns gezielt stimulieren. Diese Übungen absolvieren Sie in einzelnen Einheiten mit steigendem Schwierigkeitsgrad, angepasst an Ihren Trainingserfolg.

## NeuroNation MED

### **Umfang**

Diese Bedienungsanleitung ist gültig für:

- NeuroNation MED v.1.0.0 oder höher



eIFU indicator

**ACHTUNG: Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten, wenn Sie Fragen oder Unklarheiten zur Anwendung dieser Anwendung haben. Darüber hinaus steht Ihnen das NeuroNation MED-Supportteam für Rückfragen gerne zur Verfügung.**

## **Funktionalität**

Die NeuroNation MED-Anwendung ist eine mobile Anwendung für computergestütztes kognitives Training, das auf spielerischen Übungen für verschiedene kognitive Funktionen basiert (Multi-Domain Cognitive Training). Um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten zu trainieren, stehen innerhalb der Anwendung unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung. Diese können einzeln ausgewählt oder innerhalb einer Trainingseinheit personalisiert zusammengestellt werden.

Darüber hinaus informiert die Anwendung über kognitive Beeinträchtigungen und gezieltes Training, stellt Entspannungsübungen und Lerntechniken vor und unterstützt Sie bei deren Umsetzung. Darüber hinaus bietet die Anwendung Erinnerungsfunktionen, um das Gehirntaining und die Inhalte der Übungen zu vertiefen und in den Alltag zu integrieren.

NeuroNation MED ist für den Eigengebrauch bestimmt. Für die Anwendung sind keine Hilfsmittel erforderlich.

Die NeuroNation MED-Anwendung ist für jeden Benutzer ab 18 Jahren mit leichter oder mittelschwerer kognitiver Beeinträchtigung geeignet.

## **Nutzungsbedingungen**

Um die Anwendung nutzen zu können, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse sowie ein internetfähiges Smartphone oder Tablet.

Für eine optimale Nutzung werden folgende Geräte unterstützt:

- iPhone/iPad/iPod touch (iOS 11.0 oder höher)
- Smartphone/Tablet (Android 5.0 oder höher)

## **Verwendungszweck**

NeuroNation MED soll Patienten dabei unterstützen, die Symptome leichter oder mittelschwerer, erworbener oder neurodegenerativer kognitiver Beeinträchtigungen zu lindern.

## **Benutzergruppe**

Bei diesem Produkt ist der Benutzer der Patient. Das Produkt ist für Patienten über 18 Jahren geeignet, die unter den oben genannten Symptomen leiden und ein Standard-Smartphone verwenden können. Der Patient benötigt für die Nutzung von NeuroNation MED keine medizinischen Vorkenntnisse und muss nicht gesondert geschult werden.

## **Indikation**

NeuroNation MED ist bei leichter oder mittelschwerer, erworbener oder neurodegenerativer kognitiver Beeinträchtigung indiziert.

## Kontraindikation

Es sind keine Kontraindikationen oder Einschränkungen für die Verwendung von NeuroNation MED bekannt.

## Bewerbungsdauer


Die empfohlene Trainingsdauer durch die Anwendung beträgt insgesamt eine Netto-Trainingszeit von mindestens 18 Stunden in drei wöchentlichen Lerneinheiten à 30 – 40 Minuten.

## Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

### Vorsicht

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten, wenn Sie Fragen oder Unklarheiten zur Anwendung dieser Anwendung haben. Darüber hinaus steht Ihnen das NeuroNation MED-Supportteam für Rückfragen gerne zur Verfügung.

### Warnungen

	<ul style="list-style-type: none"><li>• NeuroNation MED kann nicht zur Diagnose Ihrer Krankheit verwendet werden. Potenziell gefährliche Krankheitsursachen können hierbei nicht ausgeschlossen werden und die Anwendung ersetzt keinen ärztlichen Rat. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Fragen zu Ihrer Diagnose haben.</li><li>• Die Schulung ersetzt keine ärztliche Behandlung. Sollten Sie eine Verschlechterung Ihrer Beschwerden bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.</li></ul>
---	--

# Hilfe

Bei Fragen, Problemen mit der Anwendung oder wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns einfach über das Hilfemenü in Ihrer App oder [unterinfo@neuronation-med.com](mailto:unterinfo@neuronation-med.com)

# Garantie



NeuroNation MED ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/45.

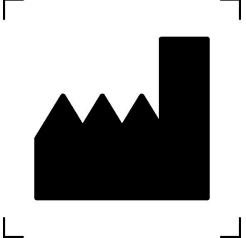
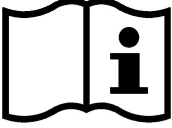



Sollten Sie als Anwender oder als behandelnder Arzt/Therapeut eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes bemerken, die möglicherweise mit der Anwendung von NeuroNation MED zusammenhängt, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

# Impressum

Melden Sie alle schwerwiegenden Vorkommnisse (Schäden, Verletzungen etc.), die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind, an [info@neuronation-med.com](mailto:info@neuronation-med.com), sowie an die zuständige Behörde.

In Deutschland ist die zuständige Behörde das BfArM. Aktuelle Kontaktinformationen finden Sie auf der Website des BfArM: <https://www.bfarm.de/>

## Beschriftung

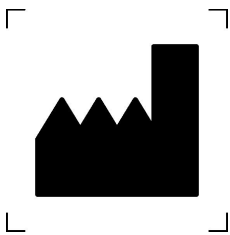
Symbol	Erläuterung
	Herstellerinformationen
 eIFU indicator	Lesen Sie die elektronische Gebrauchsanweisung
	Sicherheitshinweise
	Medizinisches Gerät
	CE-Kennzeichnung (Communauté Européenne). Ein Produkt mit diesem Zeichen erfüllt die Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinie, also der geltenden europäischen Norm.

## Haftungsausschluss

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für die Synaptikon GmbH ein wichtiges Anliegen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nach den strengen Vorgaben des in der EU und in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Datenschutzrechts unter den Grundsätzen der Datenvermeidung, Datentransparenz und Datensicherheit.

## Hersteller

### Synaptikon GmbH



Friedrichstraße 68  
10117 Berlin, Deutschland  
E-Mail: [info@neuronation-med.com](mailto:info@neuronation-med.com)

Wenn Sie eine Papierversion dieser Gebrauchsanweisung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.